



1

Insérer la pile à l'aide d'une pièce de monnaie.

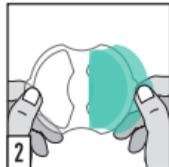

2

Prendre une recharge de gel adhésif et retirer délicatement l'un des films de protection en vous assurant que les deux parties du gel adhésif restent bien en place sur le même film de protection.

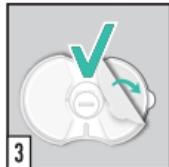


3

Positionner correctement les 2 parties du gel sur le circuit électrique en vous assurant qu'elles sont parfaitement superposées. Conserver l'un des films de protection pour le replacer sur le patch après chaque utilisation.



4

Appliquer le patch sur la zone douloureuse et appuyer sur le bouton "+" pendant **3 secondes** environ jusqu'à entendre un long bip.

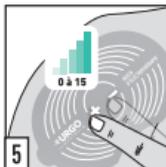

5

Appuyer sur les boutons "+" et "-" pour régler l'intensité. L'ajustement de l'intensité dépend des individus et de la zone à traiter. Augmentez progressivement le niveau d'intensité jusqu'à ce que la stimulation soit ressentie. Cesser d'augmenter avant que l'inconfort ou la douleur n'apparaisse.




6

Au bout de 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.



7

Si vous souhaitez éteindre l'appareil avant l'écoulement des 20 minutes, appuyer sur "-" pendant 3 secondes environ jusqu'à entendre un long bip.

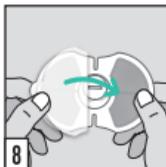

8

Retirer le patch et couvrir les gels adhésifs avec le film protecteur conservé.
1 gel adhésif = environ 20 utilisations



Ne pas utiliser sur le crâne, la nuque, la zone de la bouche, gorge, larynx, zone du cou ou carotide, à proximité du cœur, sur le torse (risque de fibrillation ventriculaire et d'arrêt cardiaque), dans la zone des parties génitales.